

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Aparat wzmacniacz dźwięku klasyczny



Zestaw zawiera:

- 1 wzmacniacz dźwięku Clear Sound [™] fabrycznie nowy,
- 3 baterie 1,5 V LR44,
- nakładki silikonowe (3 różne rozmiary).

Instrukcja obsługi:

1. Otwórz komorę baterii na spodzie naciskając zakładkę w dół.
2. Włóż baterię do mobilnej komory znakiem "+" do góry.
3. Upewnij się, że głośność jest na poziomie 1. Wybierz końcówkę, która najlepiej pasuje do Twojego ucha i przełącz na "ON".
4. Umieść wzmacniacz Clear Sound [™] w uchu tak, aby końcówka w całości znajdowała się w środku i wyreguluj poziom głośności (od 1-6) stopniowo aż do osiągnięcia poziomu głośności, jakiego potrzebujesz.

Ostrzeżenia

Używaj wzmacniacza Clear Sound [™] tylko w sytuacjach, które wymagają wzmocnienia dźwięku. Urządzenie nie powinno być stosowane dłużej niż kilka godzin ciągu dnia. Wyłącz urządzenie, gdy nie jest w użyciu. To urządzenie nie jest produktem medycznym, jeśli u pacjenta występuje utrata słuchu skonsultować się ze specjalistą. Nie moczyć i nie zanurzać w cieczach. Niniejszy produkt nie jest odpadem komunalnym, należy przestrzegać przepisów środowiskowych w celu jego recyklingu.