

**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA USZU NONOWAX**



**Instrukcja obsługi:**

1. Przesuń w dół pokrywę baterii, umieść dwie baterie 1,5 V AA we właściwej pozycji.
2. Włóż końcówkę gumową do rury ssącej Nonowax™ aż po ostatni otwór.
2. Włącz za pomocą przycisku, umieść gumową końcówkę w uchu i wsuwaj ją używając gładkich ruchów bez wchodzenia zbyt głęboko.
3. Obudowa rury ssącej i filtr wewnętrzny są zdejmowane. Czyścić obie części oraz gumową końcówkę wodą z mydłem używając szczotki.
4. Nie stosować w przypadku ran lub dolegliwości usznych.
5. Produkt nie nadaje się dla dzieci.

**Ostrzeżenia**

Niniejszy produkt nie jest odpadem komunalnym, należy przestrzegać przepisów środowiskowych w celu jego recyklingu.